

CONSEILS ET TECHNIQUES



AVERTISSEMENT

Lorsque vous guidez la sonde endotrachéale dans l'extrémité distale du vidéo-laryngoscope, veillez à regarder dans la bouche du patient, pas l'écran du moniteur vidéo. Dans le cas contraire, il existe un risque de blessure des amygdales ou du voile du palais.

TECHNIQUE EN 4 ÉTAPES

1. **Regardez dans la bouche :** tenez la lame du vidéo-laryngoscope dans la main gauche, introduisez-la dans l'axe médian du pharynx.
2. **Regardez l'écran :** identifiez l'épiglotte et manipulez la lame afin d'obtenir la meilleure vue de la glotte possible.
3. **Regardez dans la bouche :** guidez délicatement l'extrémité distale du tube en position à proximité de l'extrémité de la lame.
4. **Regardez l'écran :** terminez l'intubation en faisant pivoter ou en inclinant délicatement le tube afin de le réorienter en fonction des besoins.

CONSEILS POUR L'INSERTION DE LA LAME

- Insérez la lame dans l'axe médian de la langue vers l'épiglotte.
- Les intubations à l'aide de vidéo-laryngoscopes GlideScope nécessitent une force de traction de 0,5 à 1,5 kg (1,1 à 3,3 lb) environ.
- L'utilisation d'un stylet pour sonde endotrachéale est recommandée. Le stylet rigide GlideRite® est destiné à s'adapter à la courbure des lames en taille adulte. Un stylet déformable peut être utilisé avec un angle de 60 à 90°.
- Pour faciliter l'introduction de la sonde endotrachéale, retirez le stylet d'environ 5 cm (2 po) en avançant délicatement la sonde. Il peut également être bénéfique de retirer le laryngoscope de 1 cm (0,4 po) afin de modifier l'angle de vision et permettre l'abaissement de la glotte.



DÉMARRAGE RAPIDE

FIXATION DU BÂTON VIDÉO ET DE LA LAME STAT

1. Sélectionnez une lame Stat (lame à usage unique) et un bâton vidéo adaptés.
2. Insérez le bâton vidéo dans la lame Stat, puis appuyez sur la base du bâton vidéo jusqu'à ce qu'il soit fermement enclenché.
3. Sur le côté droit du moniteur, derrière le support, alignez la flèche du câble et la flèche du port, puis insérez le connecteur du câble jusqu'à ce qu'un dé clic se fasse entendre.



PRÉPARATION DU SYSTÈME

4. Sur le moniteur, placez le commutateur d'alimentation sur la gauche.
5. Assurez-vous que la charge de la batterie est suffisante. Le voyant d'alimentation vert ne doit pas clignoter.
6. Vérifiez que le moniteur affiche une image provenant du bâton vidéo. Une petite partie de la lame Stat peut être visible en haut ou dans le coin supérieur gauche.



Certains éléments doivent être désinfectés avant utilisation. Pour des instructions plus détaillées, consulter le manuel d'utilisation et de maintenance.



(Pour la France)

Verathon Medical France
2 allée d'Oslo
67300 Schiltigheim
France
+33.(0)3.88.60.14.02
Fax: +33.(0)3.88.60.46.87
verathon.com

(Pour la Belgique)

Verathon Medical (Europe) B.V.
Willem Fenengastraat 13
1096 BL Amsterdam
Pays-Bas
+31 (0) 20 210 30 91
Fax : +31 (0) 20 210 30 92
verathon.com



Verathon Medical (Canada) ULC
2227 Douglas Road
Burnaby, BC V5C 5A9
Canada
Tél. : 604.439.3009
Fax : 604.439.3039



Verathon Medical (Europe) B.V.
Willem Fenengastraat 13
1096 BL Amsterdam,
Pays-Bas
Tél. : +31 (0) 20 210 30 91
Fax : +31 (0) 20 210 30 92