

## CONSIGLI E TECNICHE



### AVVERTENZA

Quando si guida il tubo endotracheale (ETT) verso la punta distale del video laringoscopio, guardare l'interno della bocca del paziente e non lo schermo del monitor. In caso contrario, potrebbero verificarsi lesioni alle tonsille o al palato molle.

### TECNICA IN 4 FASI

1. **Guardare nella bocca:** tenere la lama del video laringoscopio con la mano sinistra e introdurla nella linea mediana dell'orofaringe.
2. **Guardare lo schermo:** identificare l'epiglottide e muovere la lama per ottenere la miglior visione della glottide.
3. **Guardare nella bocca:** guidare attentamente la punta distale del tubo, posizionandola vicino alla punta della lama.
4. **Guardare lo schermo:** completare l'intubazione, ruotare o inclinare con cura il tubo per direzionarlo secondo le necessità.

### CONSIGLI SULL'INSERIMENTO DELLA LAMA

- Inserire la lama lungo la linea mediana della lingua in direzione dell'epiglottide.
- Le intubazioni eseguite con i video laringoscopi GlideScope richiedono una forza di sollevamento di circa 0,5 – 1,5 kg (1,1 – 3,3 lbs).
- Si raccomanda l'utilizzo di un mandrino per tubo endotracheale. Il mandrino rigido GlideRite® è stato concepito appositamente per fare da complemento all'angolazione delle lame per adulti. Il mandrino flessibile può essere utilizzato con un'angolazione di 60-90°.
- Per facilitare il passaggio del tubo endotracheale (ETT), ritirare il mandrino di circa 5 cm (2 in) facendo avanzare lentamente l'ETT. Un eventuale ritiro della lama di 1 cm (0,4 in) potrebbe essere utile per ridurre l'angolo di visualizzazione e consentire l'abbassamento della glottide.



## AVVIO RAPIDO

### COLLEGARE LA VIDEOCAMERA E LA LAMA STAT

1. Selezionare una lama Stat (lama monouso) e una videocamera adeguata.
2. Inserire la videocamera nella lama Stat e premere sulla base finché non si blocca in posizione.
3. Sulla parte destra del monitor, dietro l'alloggiamento, allineare la freccia presente sul cavo con la freccia sulla porta, quindi inserire il connettore del cavo fino a udire un clic.



### PREPARARE IL SISTEMA

4. Sul monitor, spostare l'interruttore verso sinistra.
5. Verificare che la batteria sia carica a sufficienza. La spia verde dell'alimentazione non deve lampeggiare.
6. Verificare che sul monitor sia visualizzata l'immagine trasmessa dalla videocamera. È possibile che una piccola parte della lama Stat venga visualizzata nell'angolo superiore sinistro o nella parte superiore dello schermo.



*Alcuni componenti devono essere disinfettati prima dell'uso. Per istruzioni dettagliate, fare riferimento al Manuale di funzionamento e manutenzione.*



**Verathon Medical Italia**  
**P.le De Agostini, 3**  
**20146 Milano**  
**Italia**  
**+39 02 8905 9230**  
**Fax: +39 02 8905 8758**  
**verathon.com**