

# 팁 및 방법



## 경고

기관내관(ETT)을 비디오 후두경의 원위 단부에 삽입할 때 비디오 모니터 화면이 아닌 환자의 구강을 살펴 보아야 합니다. 그렇지 않을 경우 편도선 또는 연구개가 손상될 수 있습니다.

## 4단계 방법

1. **구강 내 확인:** 왼손에 비디오 후두경 블레이드를 잡고 구인두부의 중간에 넣습니다.
2. **화면 확인:** 후두개를 확인한 다음 최적의 성문 시야를 확보하기 위해 블레이드를 조정합니다.
3. **구강 내 확인:** 튜브의 원위 단부를 블레이드 팁 근처 위치에 주의하여 배치합니다.
4. **화면 확인:** 필요에 따라 방향을 조정하기 위해 튜브를 천천히 돌리거나 기울이면서 삽관을 완료합니다.

## 블레이드 삽입 관련 팁


- 블레이드를 후두개측 혀의 정중선으로 삽입합니다.
- GlideScope 비디오 후두경을 사용한 삽관의 경우에는 약 0.5-1.5 kg (1.1-3.3 lbs)의 양력이 필요합니다.
- 기관내관 탐침 사용을 권장합니다. GlideRite® 강성 탐침은 성인 크기의 블레이드 각도를 보완하도록 설계되었습니다. 펼 수 있는 탐침은 60°~90° 각도 내에서 사용할 수 있습니다.
- ETT의 이동을 돕기 위해 ETT를 천천히 전진시키면서 탐침을 약 5 cm(2 in) 후퇴시킵니다. 또한 블레이드를 1 cm(0.4 in) 후퇴시키면 시야각을 줄이고 성문을 아래로 내리는 데 유용할 수 있습니다.



## 빠른 시작

### 비디오 배턴 및 탐침 부착

1. 적절한 탐침(일회용 블레이드)과 비디오 배턴을 선택합니다.
2. 비디오 배턴을 탐침에 삽입한 다음, 제자리에 고정될 때까지 비디오 배턴의 베이스를 누릅니다.
3. 크레이들 뒷쪽에 있는 모니터의 오른쪽에서 케이블의 화살표와 포트의 화살표를 일렬로 맞춘 다음, 찰칵하는 소리가 들릴 때까지 케이블 커넥터를 삽입합니다.

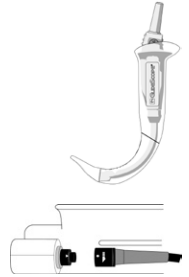

### 시스템 준비하기

4. 모니터에서 전원 스위치를 왼쪽으로 이동합니다.
5. 배터리가 충분히 충전되었는지 확인합니다. 녹색 전원 표시등이 깜박이지 않아야 합니다.
6. 모니터에 비디오 배턴의 이미지가 표시되는지 확인합니다. 모니터의 상단 또는 상단 왼쪽에 작은 탐침 부분이 표시될 수도 있습니다.



사용 전 소형 구성품을 반드시 소독해야 합니다. 자세한 내용은 작동 및 유지 보수 설명서를 참조하십시오.

