

# TIPS EN TECHNIEKEN



## WAARSCHUWING

Wanneer u de endotracheale tube (ETT) naar de distale tip van de videolaryngoscoop geleidt, moet u in de mond van de patiënt kijken, niet op het videomonitorscherm. Als dit niet gebeurt, kan dit tot beschadiging van de amandelen of het zachte gehemelte leiden.

## VIERSTAPPENTECHNIEK

1. **Kijk in de mond:** Met de videolaryngoscoopblad in uw linkerhand brengt u deze over de middenlijn van de orofarynx in.
2. **Kijk op het scherm:** Identificeer de epiglottis en manoeuvreer het blad vervolgens om het beste beeld van de glottis te krijgen.
3. **Kijk in de mond:** Breng de distale tip van de tube voorzichtig in positie vlak bij de tip van het blad.
4. **Kijk op het scherm:** Rond de intubatie af, draai of kantel de tube hierbij voorzichtig om deze indien nodig opnieuw te richten.

## TIPS VOOR HET INBRENGEN VAN HET BLAD


- Breng het blad in over de middenlijn van de tong naar de epiglottis.
- Voor intubaties met behulp van GlideScope-videolaryngoscopen is een tilkracht van ongeveer 0,5-1,5 kg (1,1-3,3 lbs) nodig.
- Het gebruik van een ETT-stilet wordt aanbevolen. Het rigide GlideRite®-stilet is ontworpen om de hoek van de bladen voor volwassenen te maken. Een buigzame stilet kan worden gebruikt met een hoek van 60-90°.
- Om het inbrengen van de ETT te vergemakkelijken, trekt u het stilet ongeveer 5 cm (2 in) terug terwijl u de ETT voorzichtig doorvoert. Het blad 1 cm (0,4 in) terughalen kan ook helpen om de kijkhoek te verkleinen en de glottis te laten zakken.



# SNELSTARTGIDS

## DE VIDEOBATON EN HET WEGWERPBLAD AANSLUITEN

1. Selecteer een geschikt wegwerpblad (blad voor eenmalig gebruik) en een geschikte videobaton.
2. Steek de videobaton in het wegwerpblad en druk vervolgens op de basis van de videobaton tot de baton op zijn plaats vastklikt.
3. Lijn de pijl op de kabel uit met de pijl op de poort aan de rechterzijde van de monitor achter de houder en steek de kabelconnector vervolgens in de poort tot u een klik hoort.

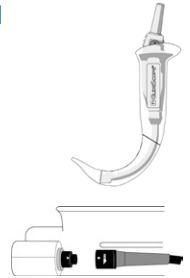

## HET SYSTEEM VOORBEREIDEN

4. Plaats de aan/uit-knop op de monitor in de linkerstand.
5. Zorg ervoor dat de accu voldoende is opgeladen. Het groene voedingslampje mag niet knipperen.
6. Controleer of op de monitor een beeld van de videobaton wordt weergegeven. Bovenaan of in de linkerbovenhoek kan een klein gedeelte van het wegwerpblad zichtbaar zijn.



*Bepaalde onderdelen moeten worden gedesinfecteerd vóór gebruik. Raadpleeg de Bedienings- en onderhoudshandleiding voor gedetailleerde instructies.*